





CALPROSMART™
Home Test Kit for IBD Patients

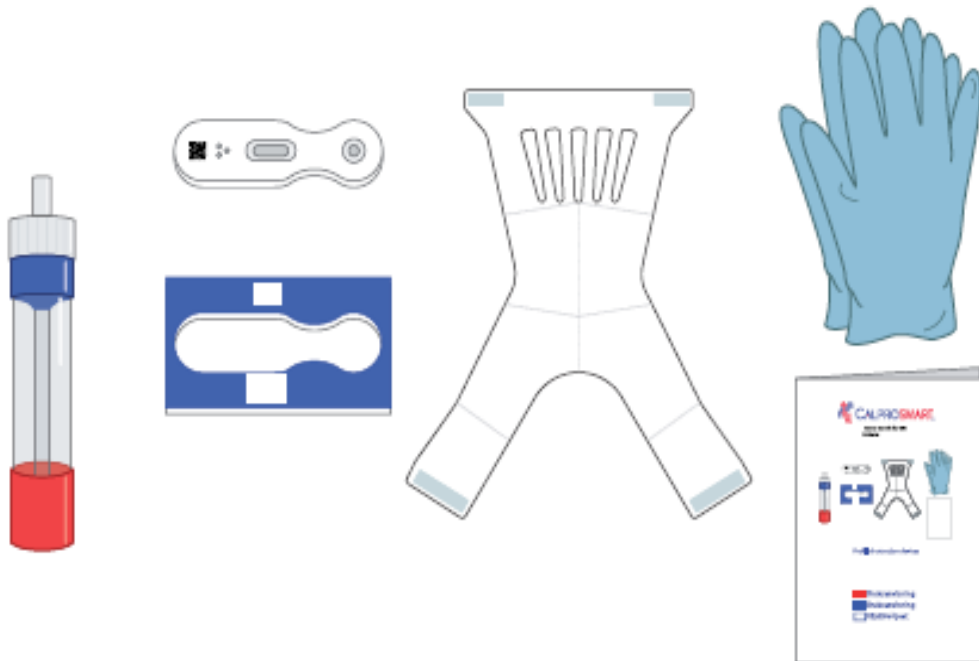


Návod pre používateľa



www.calpro.no

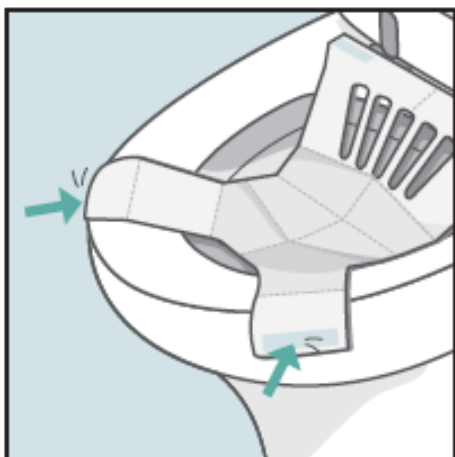

1. Nasadíte odberový papier (Easy sampler) na záchodovú misu.

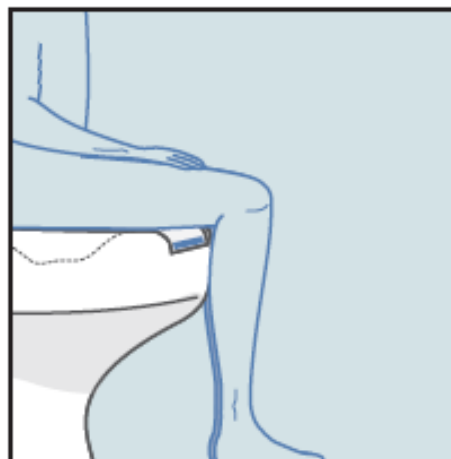


2. Vykonajte potrebu.




3. Nasadíte si rukavice




4. Držte odberovú skúmavku zvislo za modrý vrchnák, odkrúťte biely vrchnák proti smeru hodinových ručičiek a potiahnite vrchnák s odberovou špachtličkou smerom nahor. Postavte odberovú skúmavku do stojana aby bola stabilná, resp. zabezpečte proti vyliatiu. Koniec odberovej špachtličky ponorte do stolice tak, aby boli obe zarážky úplne naplnené. Ak je to možné, odoberte vzorku z rozličných miest stolice. Zabráňte naplneniu zarážok bublinami, semenkami, vlákninou resp. nestrávenými zvyškami potravy.

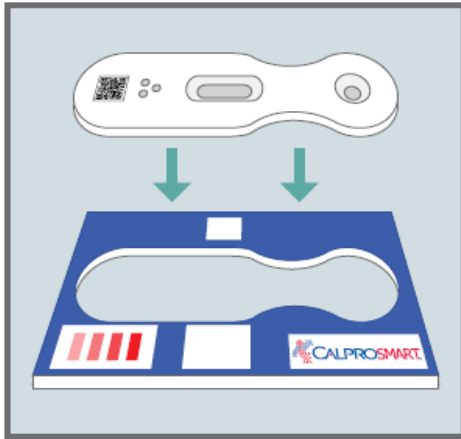


5. Umiestnite podporný rámik na rovný a pevný povrch. Otvorte obal s testovacou kazetou a vložte ju do rámika. **Zapnite aplikáciu na smartfóne a pozorne sledujte kroky zobrazujúce sa na displeji.**

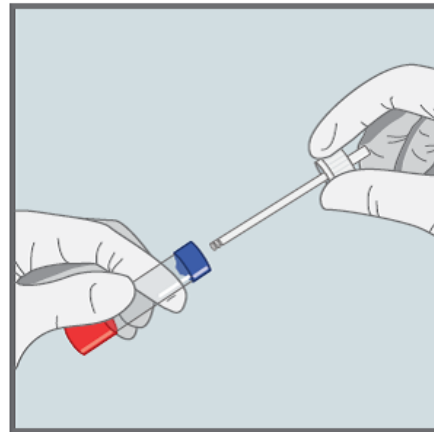


6. Držte odberovú skúmavku modrým vrchnákom (adaptérom) nahor a vložte vzorku stolice cez otvor v modrom adaptéri. Nadbytok stolice sa zotrie. Zakrúťte biely vrchnák v smere hodinových ručičiek na modrý adaptér až pokiaľ nepocítite cvaknutie a zastavenie.

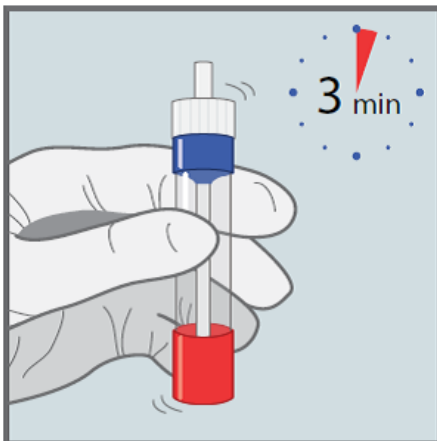

7. Uistite sa, že odberová skúmavka je úplne uzavretá a dôkladne ju premiešavajte **3 minúty** pokým sa stolica nerozpustí. Sledujte aplikáciu.

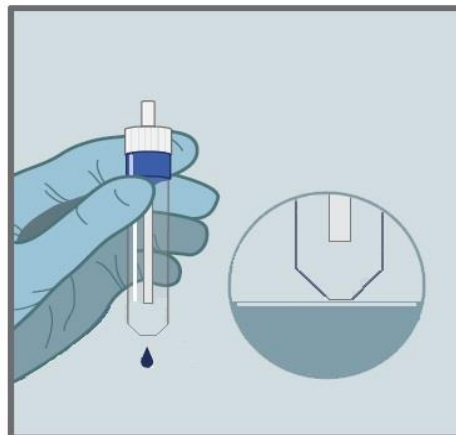


8. Otvorte červený vrchnák a **odstráňte prvú kvapku stlačením odberovej skúmavky (VEĽMI DÔLEŽITÝ KROK!).** Jemne otrite špičku odberovej skúmavku o kúsok toaletného papiera.

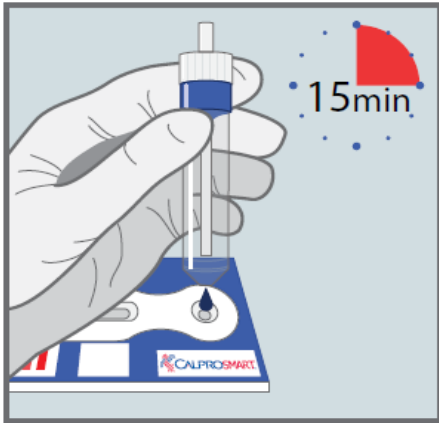

9. Držte odberovú skúmavku kolmo nad testovacou kazetou. Stlačením kvapnite dve kvapky do testovacieho okienka a nechajte test inkubovať pri izbovej teplote **15 minút**. Sledujte aplikáciu.




10. Dajte si dole jednorazové rukavice a zničte ich. Umyte si ruky aby ste zabránili kontaminácii zo vzorky.

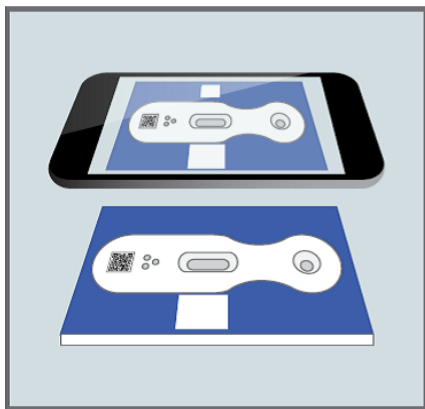

11. Po ukončení inkubácie (mobilná aplikácia ohlásí pípnutím) držte smartfón vodorovne nad podporným rámkom, v ktorom je umiestnená testovacia kazeta.



12. Keď zelené obdĺžniky prekryjú biele obdĺžniky a zelený štvorček prekryje barkód testovacej kazety, fotoaparát automaticky urobí fotku. **Poznámka: Fotka musí byť urobená do 2 minút po odznení signálu vyzývajúceho k foteniu!**

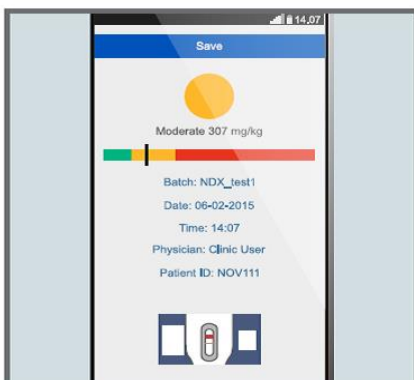

13. Výsledky sú zobrazené ako semafor, s hladinami kalprotektínu v mg/kg. Stlačte tlačidlo **SAVE**, aby sa výsledok uložil a bol zaslaný lekárovi.